

# TERUMO FINETOUGH®

## SOLUTION DIABÈTE - Informations produits

Produit	Emballage	Référence
 Système de contrôle de la glycémie TERUMO FINETOUGH® Contenu : 1 Glucomètre, 25 Capteurs Test TIP, 1 Autopiqueur, 25 Lancettes, 1 Capteur de contrôle, 1 sac de transport souple, 2 piles	1 Kit	MS-GKITMGBE code CNK 2688-091
 Capteurs Test TIP TERUMO FINETOUGH®	1 x 25 pièces 2 x 25 pièces	MS*GC25C code CNK 2438-802 MS-GC25C02 code CNK 2663-540
 Autopiqueur TERUMO FINETOUGH®	1 pièce	MS*GN02C code CNK 2438-828
 Lancettes TERUMO FINETOUGH®	1 x 25 pièces 4 x 25 pièces	MS*GN4525C code CNK 2438-810 MS-GN4525C04 code CNK 2658-433



**TERUMO EUROPE N.V.**  
Researchpark Haasrode 1520  
Interleuvenlaan 40  
3001 Leuven  
BELGIUM  
Tel. +32 1638 1211  
Fax +32 1640 0249

**TERUMO EUROPE N.V.**  
Benelux Sales Division  
Researchpark Haasrode 1520  
Interleuvenlaan 40  
3001 Leuven  
BELGIUM  
Tel. +32 1639 2580  
Fax +32 1639 2599  
Tel. (toll-free) 0800 16 126

**TERUMO DEUTSCHLAND GmbH**  
Hauptstrasse 87  
65760 Eschborn  
GERMANY  
Tel. +49 6196 8023 0  
Fax +49 6196 8023 200  
Tel. (gebührenfrei) 0800 346 3868

©: Marque déposée  
Publication par Terumo Europe N.V.

**TERUMO ITALIA srl**  
Via Simone Martini 143-145  
00142 Roma RM  
ITALY  
Tel. +39 06 519 61420  
Fax +39 06 503 0407  
Tel. (numero verde) 800 66 1103

**TERUMO UK Ltd.**  
Tamesis  
The Causeway  
Egham  
Surrey  
TW20 9AW  
UNITED KINGDOM  
Tel. +44 1784 476 200  
Fax +44 1784 476 201  
Tel. (toll-free) 0800 988 4617

**LABORATOIRES TERUMO  
FRANCE S.A.**  
Parc Ariane - Bât. Uranus  
1 rue Hélène Boucher  
78284 Guyancourt Cedex  
FRANCE  
Tel. +33 1 3096 1300  
Fax +33 1 3043 6085



TERUMO SOLUTION DIABÈTE

Autres questions ? Visitez

[www.terumo-diabetes.com](http://www.terumo-diabetes.com)  
[diabetes@terumo-europe.com](mailto:diabetes@terumo-europe.com)

DI 80FFR-0110FD-102.101E



# TERUMO FINETOUGH®

Système de contrôle de la glycémie



# TERUMO FINETOUGH®

La combinaison parfaite du design et de la fiabilité

Découvrez le nouvel acteur du monde du diabète chez TERUMO

Capteur  
Test TIP maniable

fixation facile

application  
ingénieuse

Design  
à la mode

aspect métallique  
forme pratique

Mémoire XL

500 valeurs

interface pour  
transmission  
de données

Aucun contact  
avec le sang

éjection propre  
élimination en toute  
sécurité

La mesure de la glycémie se doit d'être **PRÉCISE**



Le glucomètre TERUMO FINETOUGH® tient compte du taux d'hématocrite

Par conséquent, les variations du taux d'hématocrite n'ont pas d'influence substantielle sur les résultats.



Les capteurs Test TIP TERUMO FINETOUGH® utilisent l'enzyme GOD (glucose-oxidase)

Les capteurs Test TIP réagissent seulement avec le glucose. Ils ne sont pas influencés par le maltose, le xylose, l'icodextrine ou le galactose.



Les capteurs Test TIP TERUMO FINETOUGH® sont emballés individuellement

Les capteurs Test TIP sont protégés contre les influences du milieu extérieur comme l'humidité ou les saletés.

Se piquer doit simplement faire **MOINS MAL**



5 profondeurs de pénétration réglables

Profondeur de pénétration minimale de seulement 0,3 mm.

Utilisation en toute sécurité

La conception intelligente de la lancette empêche toute piqûre accidentelle avec l'aiguille.

Conception fonctionnelle du design de l'aiguille

Dans une étude<sup>1</sup>, la majorité des patients ont considéré la lancette TERUMO FINETOUGH® comme étant moins douloureuse.



<sup>1</sup>Kordonouri, O. et al., 2007, Diabetologie & Stoffwechsel; 2: S72