

Contact info:

TERUMO Europe N.V.
Benelux Sales Division
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven
Belgique

Tél. (numéro vert): 0800 16 126

email: diabetes@terumo-europe.com

Site web: www.terumo-diabetes.com

Nom: _____
Adresse: _____
Tél.: _____

En cas d'urgence, contactez :

Nom: _____
Adresse: _____
Tél.: _____

Médecin traitant: _____
Institution: _____
Tél.: _____

Messages d'erreur affichés.
(Voir le guide d'utilisation p. 37-41 pour plus de détails)

Affichage



Cause

Le capteur Test TIP a été inséré de biais (pas droit) ou de façon incomplète. Un capteur Test TIP usagé est fixé sur le glucomètre. La fenêtre de mesure est sale ou empoussiérée. Voir également le guide d'utilisation aux pages 50 à 53 concernant le « Contrôle du fonctionnement du glucomètre ».



La fenêtre de mesure est peut-être sale ou empoussiérée. Nettoyer la fenêtre de mesure à l'aide d'un coton-tige.

Voir également le guide d'utilisation aux pages 50 à 53 concernant le « Contrôle du fonctionnement du glucomètre ».



La température ambiante est hors des limites prescrites (10 à 35°C).



Le lieu de mesure est trop lumineux. Tourner le glucomètre vers un endroit plus sombre ou le placer dans un lieu qui n'est pas exposé directement aux rayons du soleil. Le message "L" disparaîtra alors.



La glycémie mesurée est supérieure à 600 mg/dL.



La glycémie mesurée est inférieure à 20 mg/dL.

Messages d'erreur affichés.
(Voir le guide d'utilisation p. 37-41 pour plus de détails)

Affichage



Cause

Le capteur Test TIP s'est détaché pendant la mesure.



Le lieu de mesure est trop lumineux. Le capteur Test TIP s'est détaché pendant la mesure.



Le glucomètre est hors service. Contacter TERUMO.




L'affichage de pile clignote. Les piles sont presque épuisées.



L'affichage de pile est fixe. Les piles sont épuisées. La mesure ne peut pas être réalisée.



L'affichage s'éteint. 2 minutes se sont écoulées sans action (si le capteur Test TIP n'est pas sur le glucomètre). 5 minutes se sont écoulées sans action (si le capteur Test TIP est sur le glucomètre).

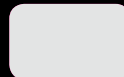

L'affichage est éteint. Le bouton "Ⓞ" n'a pas été appuyé. Les piles sont mal placées. Les piles sont épuisées.

TERUMO FINETOUCH®

Système d'autocontrôle de la glycémie


COURTES INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Lire avec attention les instructions détaillées données dans le guide d'utilisation avant d'utiliser pour la première fois cet appareil pour lecture de la glycémie.


PHASE 1 - PREPARATION

Nettoyer et sécher vos mains minutieusement

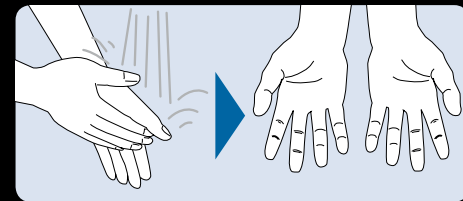


PHASE 2 – FIXER LE CAPTEUR

Enlever le capuchon protecteur

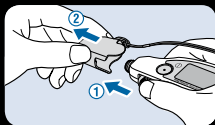

1. Pousser le bouton d'éjection vers l'avant.
2. Tirer sur le capuchon protecteur.

Appuyer sur le bouton "⓪"

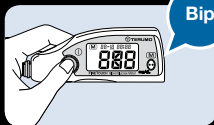


Vous entendez un bip.


Fixer le capteur Test TIP (avec film protecteur bleu)



Enlever le film protecteur du capteur.

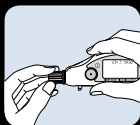

Fixer le capteur sur le glucomètre.

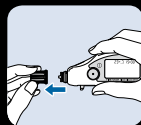



Enlever le boîtier du capteur.




Après deux bips, "OK" apparaîtra à l'écran.

PHASE 3 – PRELEVEMENT DU SANG

Choisir la profondeur de la ponction

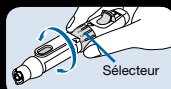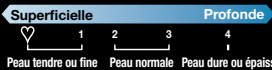


Sélecteur

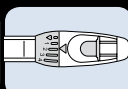


S'assurer que l'indicateur de profondeur (▲) est bien en regard d'un trait sur le sélecteur.

Insérer la lancette

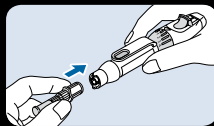


Insérer la lancette jusqu'à entendre un clic sonore.

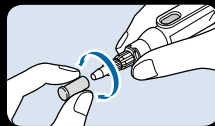


Tourner et tirer le capuchon et l'enlever.

Piquer votre doigt

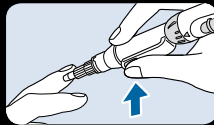

Placer la lancette doucement sur votre peau et appuyer sur le bouton déclencheur.

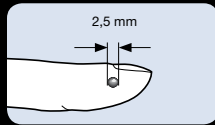

Presser doucement votre doigt, jusqu'à obtenir une goutte de sang d'environ 2,5 mm.


PHASE 4 – MESURE DE LA CONCENTRATION EN GLUCOSE

S'assurer que l'écran affiche "OK"



Si rien n'est affiché à l'écran, appuyer sur le bouton "⓪" pour actionner le glucomètre.

Placer le capteur Test TIP sur la goutte de sang

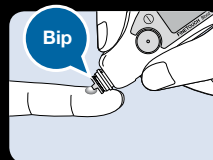

Ne pas presser le capteur sur la peau. Retirer immédiatement le capteur après avoir entendu un bip.



Lire les résultats sur le glucomètre




Un compte à rebours de 10 à 1 secondes affiche le temps restant. Après le bip le résultat s'affichera à l'écran.

PHASE 5 – NETTOYAGE


Enlever le capteur Test TIP et éteindre le glucomètre

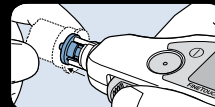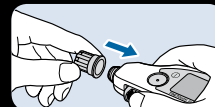

Couvrir le capteur à l'aide de son boîtier. Pousser le bouton d'éjection vers l'avant pour déverrouiller le capteur. Enlever le capteur et le boîtier en même temps et éliminer en toute sécurité.

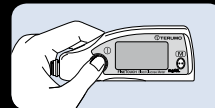


Appuyer sur le bouton "⓪" durant plus de 1 seconde pour éteindre le glucomètre.

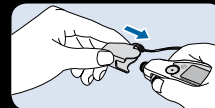

Remettre le capuchon protecteur sur le glucomètre.

Enlever la lancette

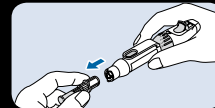

Enlever la lancette de l'autopiqueur et l'éliminer en toute sécurité.

Attention: Une fois la lancette retirée de l'autopiqueur ne pas l'y réinsérer. Dans le cas contraire, l'aiguille pourrait dépasser de son support, sans clic sonore et risquerait de vous piquer accidentellement.