

Contactinformatie:

TERUMO Europe N.V.
Benelux Sales Division
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven
België

Tel. (groen nummer): 0800 16 126
email: diabetes@terumo-europe.com
website: www.terumo-diabetes.com

Naam:
Adres:
Tel.:

Gelieve in geval van nood te verwittigen:

Naam:
Adres:
Tel.:

Behandelende arts:
Ziekenhuis - departement:
Tel.:

Foutmeldingen op het scherm.
(Zie gebruikshandleiding pag. 37-41 voor meer informatie)

Foutmelding



Oorzaak

De Test TIP is onder een hoek (niet loodrecht) of niet helemaal aangebracht.
Er zit een gebruikte Test TIP op de Meter.
Het meetvenster is vuil of stoffig.
Raadpleeg ook pag. 50 – 53 'Controle van de werking van de Meter'.



Het meetvenster is mogelijk vuil of stoffig.
Maak het meetvenster schoon met een wattenstaafje.
Raadpleeg ook pag. 50 – 53 'Controle van de werking van de Meter'.



De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag (ligt niet tussen 10 en 35 °C).



De meetomgeving is te licht.
Richt de Meter naar een donkerder plek of ga naar een plaats zonder direct zonlicht.
De "L" verdwijnt.



De bloedglucosewaarde is hoger dan 600 mg/dL.



De bloedglucosewaarde is lager dan 20 mg/dL.

Foutmeldingen op het scherm.
(Zie gebruikshandleiding pag. 37-41 voor meer informatie)

Foutmelding



Oorzaak

De Test TIP raakte los tijdens het meten.



De meetomgeving is te licht.
De Test TIP raakte los tijdens het meten.



De Meter is defect.
Neem contact op met TERUMO.




Het batterij-symbool knippert.
De batterijen zijn bijna leeg.



Het batterij-symbool blijft op het scherm.
De batterijen zijn leeg. De meting kan niet worden uitgevoerd.



Scherf wordt leeg.
Er zijn 2 minuten zonder activiteit verstreken (als de Test TIP niet op de Meter zit).
Er zijn 5 minuten zonder activiteit verstreken (als de Test TIP op de Meter zit).

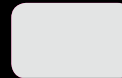

Het scherm is leeg.
De "ⓘ"-toets is niet ingedrukt.
De batterij is verkeerd geplaatst.
De batterijen zijn leeg.

TERUMO FINETOUCH®

Bloedglucosecontrolesysteem
voor zelftesten


KORTE GEBRUIKSAANWIJZING



Lees aandachtig de gebruikshandleiding voor het eerste gebruik.


STAP 1 – VOORBEREIDING

Was uw handen en droog ze goed af

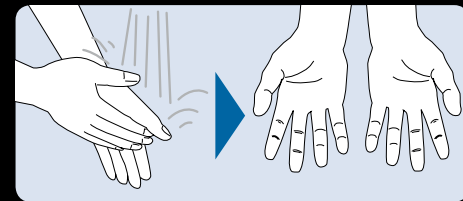


STAP 2 – TEST TIP BEVESTIGEN

Verwijder de beschermkap

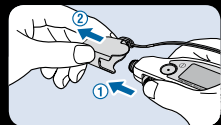


1. Schuif de uitwerpknop naar voren.
2. Verwijder de beschermkap.

Druk op de "Ⓜ"-toets

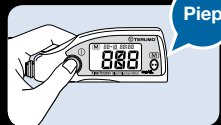


U hoort de meter piepen.


Test TIP (met blauwe beschermfolie) bevestigen

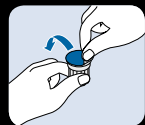


Verwijder de beschermfolie van de Test TIP-houder.

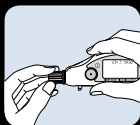

Plaats de TIP-houder met de Test TIP over de metertip.

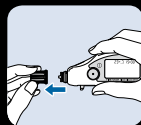



Verwijder de TIP-houder van de Test TIP.

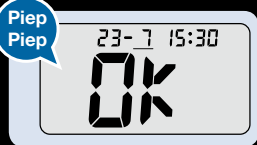


Na twee piepjes verschijnt "OK" op het scherm.

STAP 3 – BLOED PRIKKEN

Stel de draaiknop in op de gewenste prikdiepte

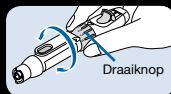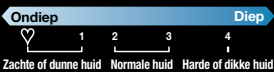


Draaiknop

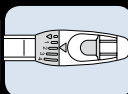


Zorg ervoor dat de pijl (▲) het gewenste dieptestreepje precies aanwijst.

Lancet bevestigen

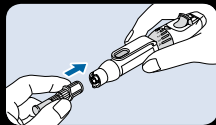


Steek het lancet in het prikinstrument tot u een duidelijke klik hoort.

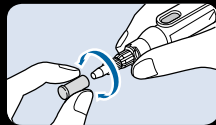


Verwijder het dopje met een draaiende en trekkende beweging van het lancet.

Prik uw vinger voor een bloedstaal

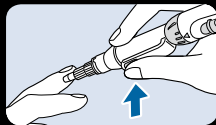

Plaats het lancet zachtjes tegen de huid en druk op de drukknop.

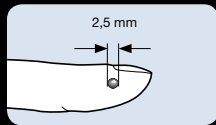

Knijs lichtjes rond de prikplaats tot je een bloeddruppel hebt - diameter ca. 2,5 mm.


STAP 4 – METEN

Controleer of "OK" is aangegeven op het scherm



Als het scherm leeg is, druk dan op de "Ⓜ"-toets om de meter aan te schakelen.

Breng de Test TIP voorzichtig in contact met de bloeddruppel

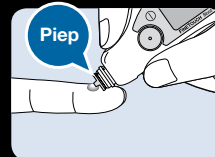

Druk de Test TIP niet tegen de huid. Verwijder de Test TIP van de bloeddruppel wanneer u de pieptoon hoort.



Lees het resultaat af van het scherm




De meter telt af van 10 naar 1. Na de pieptoon wordt het meetresultaat weergegeven.

STAP 5 – OPRUIIMEN


Verwijder de Test TIP en schakel de meter uit

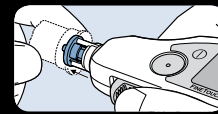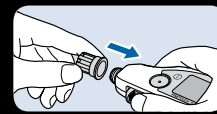

Plaats de TIP-houder over de Test TIP. Beweeg de uitwerpknop naar voren. Verwijder de TIP-houder met Test TIP.

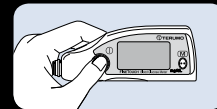


Schakel de meter uit door de "Ⓜ"-toets gedurende meer dan 1 seconde in te drukken.

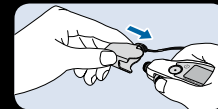

Plaats de beschermkap terug op de metertip.

Verwijder het lancet

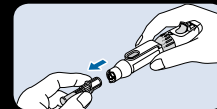

Verwijder het lancet uit het prikinstrument en werp het lancet weg in een daarvoor bestemde container.

Voorzichtig: Eens het lancet van het prikinstrument is verwijderd, dit lancet niet meer opnieuw gebruiken. De naald kan anders naar buiten steken en prikletsels veroorzaken.